

## Finales Festdrehen mit dem Drehmomentbegrenzer 10 Nm konisch

SI-0020  
SPECIALS Drehmoment-  
begrenzer 10 Nm, konisch



VI-1450  
VERTICALE Gegenhalter



Der VERTICALE Gegenhalter wird als Rotationsstabilisator beim Festziehen der Madenschraube sowohl in der Kurz- als auch in der Langkopfschraube genutzt. Die konische, selbsthaltende Form des Arbeitsendes erleichtert die Aufnahme der Madenschraube (Abb. 1) und sichert diese gegen unbeabsichtigtes Herunterfallen. Um die Madenschraube geführt zu setzen, wird der Gegenhalter direkt auf den Schraubkopf aufgesetzt. Dann kann der SPECIALS Drehmomentbegrenzer 10 Nm, konisch durch den Gegenhalter geführt (Abb. 2) und die Madenschraube final mit einem Drehmoment von 10 Nm angezogen worden (ein deutliches Klickgeräusch zeigt an, dass das Drehmoment erreicht ist).

Das gleiche Vorgehen ist bei allen anderen Madenschrauben zu wiederholen.

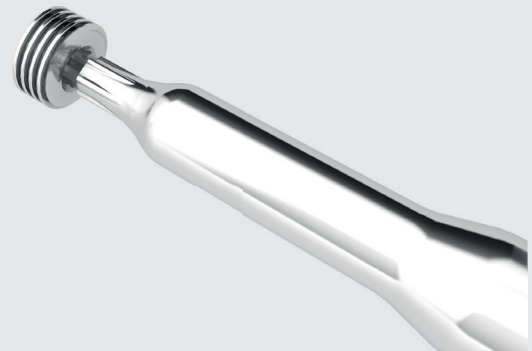


Abb. 1 Aufnahme der Madenschraube mit konischem Arbeitsende

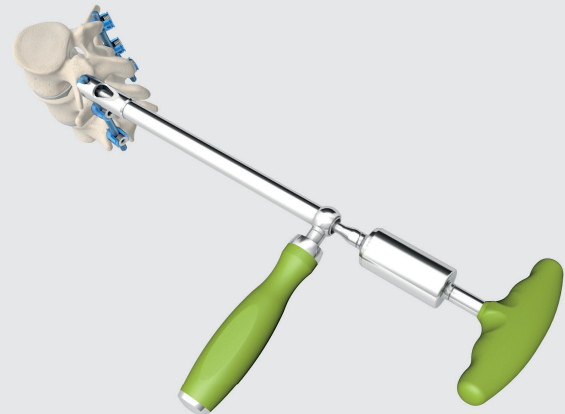


Abb. 2 Finales Eindrehen mit dem Drehmomentbegrenzer 10 Nm konisch und dem Gegenhalter

## KONTROLLE

Der SPECIALS Drehmomentbegrenzer 10 Nm, konisch, muss in regelmäßigen Abständen zur Überprüfung des Drehmoments zum Hersteller zurückgeschickt werden. Das Wartungsintervall wird fällig nach entweder 6.000 Klicks, nach 250 Wasch- und Sterilisationszyklen oder nach Ablauf von 3 Einsatzjahren (siehe hierzu D30035).



 D30003; D30035

 D30000

D30110.a.DE  
16.05.2017

 Silony Medical Europe GmbH

Bahnhofstraße 1  
28195 Bremen

Tel +49 421 246 956 0

Fax +49 421 246 956 55

 Silony Medical GmbH

Leinfelder Straße 60  
70771 Leinfelden-Echterdingen

Tel +49 711 78 25 25 0

Fax +49 711 78 25 25 11

[www.silony-medical.com](http://www.silony-medical.com)

MADE IN GERMANY