

## Temporäres Fixieren der Madenschrauben

SI-0022  
SPECIALS Madenschraubeneinsetzer, konisch



VI-1410  
VERTICALE Schutzhülse



Das Einsetzen der Madenschraube erfolgt mit dem SPECIALS Madenschraubeneinsetzer. Die konische, selbsthaltende Form des Arbeitsendes erleichtert die Aufnahme der Madenschraube (Abb. 1) und sichert diese gegen unbeabsichtigtes Herunterfallen. Durch leichtes Andrehen der Madenschraube wird eine temporäre Fixierung des Stabes erzielt (Abb. 2).

Zum geführten Einsetzen der Madenschrauben steht die VERTICALE Schutzhülse zur Verfügung. Sie wird auf den Pedikelschraubenkopf und auf den Stab aufgesteckt (Abb. 3) und passt sowohl auf den Pedikelschraubenkopf der Kurzkopf- und Langkopfschrauben.

**HINWEIS:** Madenschrauben müssen immer leichtgängig rechtsdrehend einzubringen sein. Um ein Verkanten zu vermeiden, kann eine kurze Linksdrehung vorab das Einlaufen der Madenschraube in den ersten Gewindegang erleichtern.

VI-1450  
VERTICALE Gegenhalter



Es steht ein VERTICALE Gegenhalter als Rotationsschutz zum Anziehen der Madenschrauben zur Verfügung, der komfortabel in Längs- oder Querrichtung zum Stab aufgesetzt werden kann (Abb. 4).



Abb. 1 Aufnahme der Madenschraube mit konischem Arbeitsende

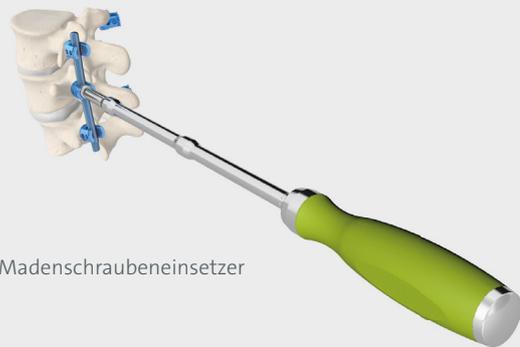


Abb. 2 Madenschraubeneinsetzer

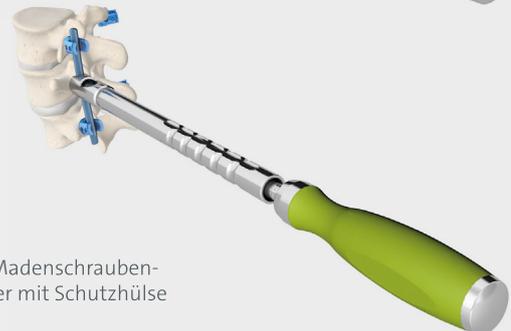


Abb. 3 Madenschraubeneinsetzer mit Schutzhülse



Abb. 4 Madenschraubeneinsetzer mit Gegenhalter

 D30003

 D30000

D30115.a.DE  
26.05.2017

 Silony Medical Europe GmbH

Bahnhofstraße 1

28195 Bremen

Tel +49 421 246 956 0

Fax +49 421 246 956 55

 Silony Medical GmbH

Leinfelder Straße 60

70771 Leinfelden-Echterdingen

Tel +49 711 78 25 25 0

Fax +49 711 78 25 25 11

[www.silony-medical.com](http://www.silony-medical.com)

MADE IN GERMANY