

Eröffnung des Pedikels mit der Ahle mit Heptagon Spitze

VI-1027
VERTICALE Ahle, Heptagon
Spitze, gerade



VI-1029
VERTICALE Ahle, Heptagon
Spitze, gebogen



Der gewünschte Schraubeneintrittspunkt in den Pedikel wird anhand anatomischer Landmarken und unter radiologischer Kontrolle definiert. Zur weiteren Eröffnung des Pedikels bis in den spongösen Bereich des Wirbelkörpers wird eine entsprechende VERTICALE Ahle genutzt (Abb. 1) Die speziell geformte Spitze der Ahle (Abb. 2) ermöglicht eine zielgerichtete Pedikeleröffnung. Die Markierung am Instrument gibt dabei die Eindringtiefe an (Abb. 3).

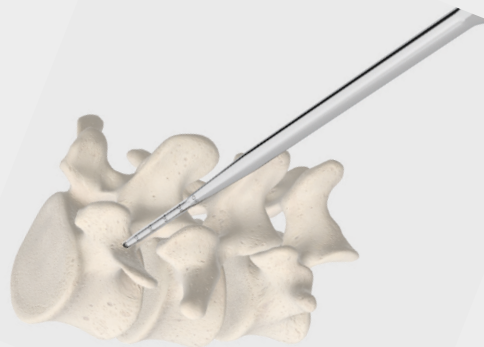


Abb. 1 Pedikelvorbereitung mit der Ahle



Abb. 2 Heptagon Spitzen der Ahle, gebogen und gerade

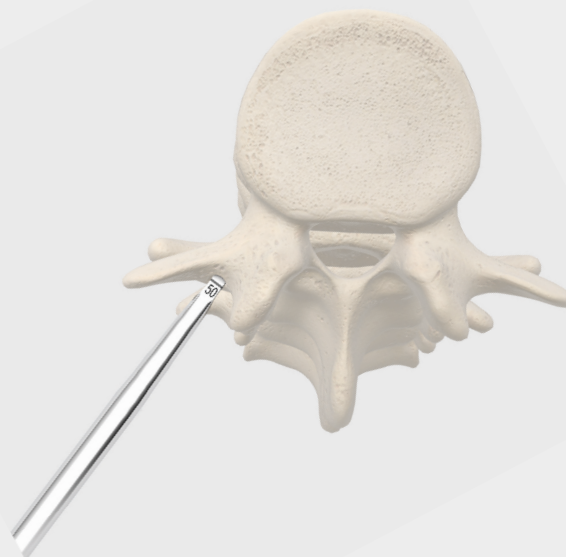


Abb. 3 Orientierungshilfe zur Eindringtiefe der Ahle

 D30003

 D30000

D30126.a.DE
19.10.2017

 Silony Medical Europe GmbH

Bahnhofstraße 1

28195 Bremen

Tel +49 421 246 956 0

Fax +49 421 246 956 55

 Silony Medical GmbH

Leinfelder Straße 60

70771 Leinfelden-Echterdingen

Tel +49 711 78 25 25 0

Fax +49 711 78 25 25 11

www.silony-medical.com

MADE IN GERMANY