

# VERTICALE<sup>®</sup> MIS

VI-4180




GI-1TRK  
T-Griff Ratsche kanüliert



VI-4180  
VERTICALE MIS  
Arbeitsturmdiskonnektor



Zum Lösen der Arbeitstürme muss der VERTICALE MIS Arbeitsturmdiskonnektor mit dem Griff verbunden werden und wird dann in den MIS Arbeitsturm eingeführt. Der Arbeitsturm wird durch eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn mit leichtem Druck nach unten von dem Pedikelschraubenkopf gelöst. Erst wenn die gelbe Markierung auf dem Arbeitsturm sichtbar wird (Abb. Zoom) ist der Arbeitsturm vollständig von der Schraube gelöst und kann entfernt werden. Der VERTICALE MIS Gegenhalter kann hierbei als Rotationsstabilisator beim Lösen der MIS Arbeitstürme genutzt werden.

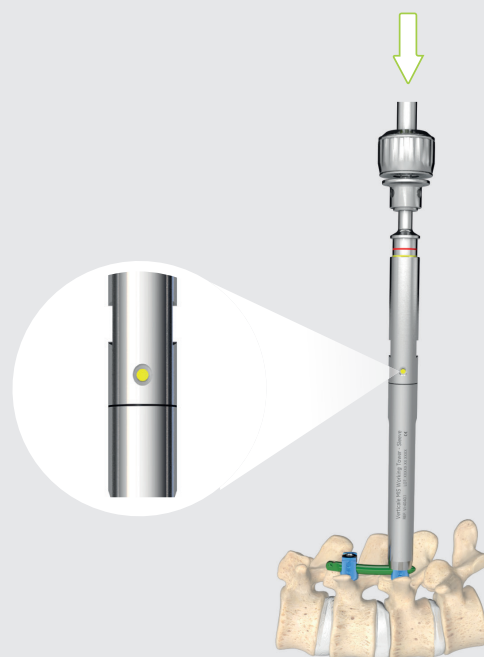

Entfernen der VERTICALE MIS Arbeitstürme mittels VERTICALE MIS Arbeitsturmdiskonnektor

D30003

D30049

D30187.a.DE  
29.11.2018

Silony Medical Europe GmbH

Bahnhofstraße 1  
28195 Bremen, Germany  
Tel +49 421 24 69 56 0  
Fax +49 421 24 69 56 55

[www.silony-medical.com](http://www.silony-medical.com)

Silony Medical GmbH

Leinfelder Straße 60  
70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany  
Tel +49 711 78 25 25 0  
Fax +49 711 78 25 25 11

MADE IN GERMANY