

Reposition mit dem Repositionsinstrument

SI-0043
SPECIALS Quick Repositionsflügel
Torx



VI-1360
VERTICALE Repositions-
instrument



VI-1361
VERTICALE Repositionseinsatz



Zunächst wird das VERTICALE Repositionsinstrument formschlüssig auf den Schraubenkopf aufgebracht. Unter Beachtung der Leichtgängigkeit wird der VERTICALE Repositionseinsatz in das Repositionsinstrument eingesetzt. Das SPECIAL Instrument wird am vorhandenen Torx des Einsatzes aufgesetzt und durch Drehen des Quergriffs wird der Stab in den Schraubenkopf eingeführt (Abb.1). Gleichzeitig korrigiert sich die Lage des Wirbelkörpers in die posteriore Richtung.

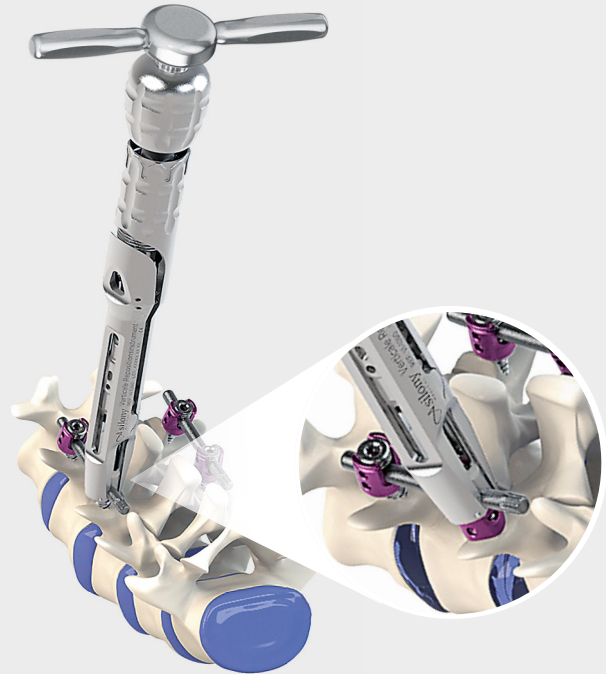


Abb.1 Repositionsmanöver mit dem Repositionsinstrument

 D30003

 D30000

D30200.a.DE
28.05.2019

 **Silony Medical Europe GmbH**

Bahnhofstraße 1
28195 Bremen

Tel +49 421 246 956 0

Fax +49 421 246 956 55

 **Silony Medical GmbH**

Leinfelder Straße 60
70771 Leinfelden-Echterdingen

Tel +49 711 78 25 25 0

Fax +49 711 78 25 25 11

www.silony-medical.com

MADE IN GERMANY