

## Reposition mit dem Repositionsinstrument

SI-0043  
SPECIALS Quick Repositionsflügel  
Torx



VI-1360  
VERTICALE Repositions-  
instrument



VI-1361  
VERTICALE Repositionseinsatz



Zunächst wird das VERTICALE Repositionsinstrument formschlüssig auf den Schraubenkopf aufgebracht. Unter Beachtung der Leichtgängigkeit wird der VERTICALE Repositionseinsatz in das Repositionsinstrument eingesetzt. Das SPECIAL Instrument wird am vorhandenen Torx des Einsatzes aufgesetzt und durch Drehen des Quergriffs wird der Stab in den Schraubenkopf eingeführt (Abb.1). Gleichzeitig korrigiert sich die Lage des Wirbelkörpers in die posteriore Richtung.

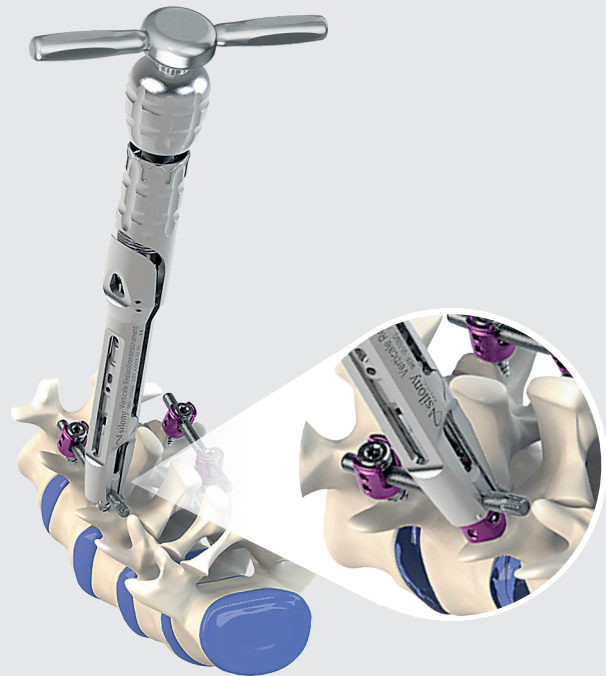


Abb. 1 Repositionsmanöver mit dem Repositionsinstrument



D30003



D30000

D30200.b.DE  
29.09.2022