

ROCCIA® 4W PSTS Strumento d'inserimento

4W-3010; 4W-3011; 4W-3012



4W-3010
4W PSTS Strumento
d'inserimento, fusto



4W-3011
4W PSTS Strumento
d'inserimento, piccolo



4W-3012
4W PSTS Strumento
d'inserimento, grande





Inserimento della cage



Lo strumento d'inserimento 4W PSTS viene avvitato nei fori filettati della cage, consentendo l'introduzione definitiva della cage senza dover cambiare nuovamente lo strumento.

Per creare un fissaggio stabile tra la cage e lo strumento d'inserimento, si ruota l'impugnatura girevole dello strumento in direzione del lucchetto chiuso. Per liberare la cage, si ruota l'impugnatura girevole in direzione del lucchetto aperto.

Dopo aver raggiunto il posizionamento finale dell'impianto, lo strumento d'inserimento viene svitato dalla cage e rimosso. Questa operazione viene opportunamente ripetuta sul lato opposto.

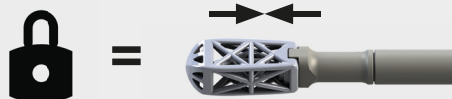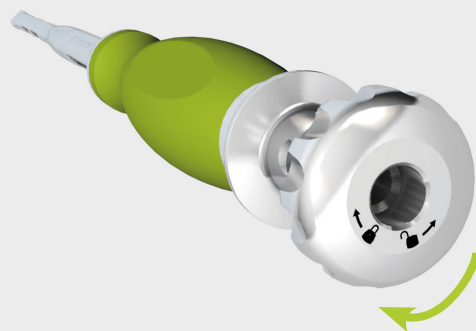

Ruotando in direzione del lucchetto chiuso, si collega saldamente lo strumento d'inserimento alla cage

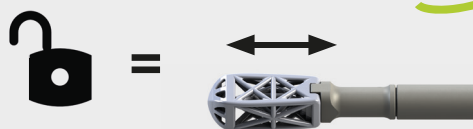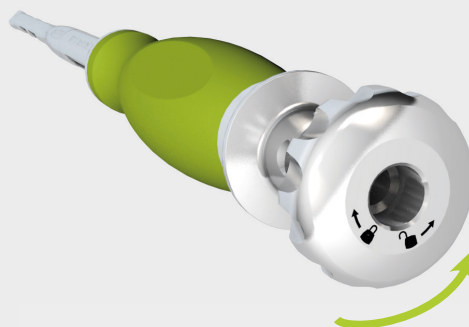

Ruotando in direzione del lucchetto aperto, si stacca lo strumento d'inserimento dalla cage

NOTA: il posizionamento finale o il successivo impattamento della cage con lo strumento d'inserimento può essere effettuato solo se lo strumento è stato completamente montato oppure se il fusto è stato rimosso. In caso contrario, il foro filettato della cage o la filettatura di collegamento dello strumento può danneggiarsi.

D30250.a.IT
25.05.2021

 Silony Medical GmbH

Leinfelder Straße 60

70771 Leinfelden-Echterdingen, Germania

Tel. +49 711 78 25 25 0

Fax +49 711 78 25 25 11

www.silony-medical.com

 elabeling.silony-medical.com/contact

MADE IN GERMANY

ROCCIA® 4W PSTS Strumento d'inserimento 4W-3010; 4W-3011; 4W-3012



4W-3010
4W PSTS Strumento d'inserimento, fusto



4W-3011
4W PSTS Strumento d'inserimento, piccolo



4W-3012
4W PSTS Strumento d'inserimento, grande



Strumento d'inserimento utilizzato come impattatore

Lo strumento d'inserimento può essere impiegato in vari modi: agendo sull'impugnatura girevole è possibile smontare i due componenti dello strumento, in modo da poterli utilizzare separatamente. Smontare il fusto dello strumento d'inserimento tirando indietro il fusto dello strumento d'inserimento 4W-3010 fino al punto di arresto. A questo punto ruotare il fusto in direzione del lucchetto aperto fino a liberare il fusto.

Successivamente, dopo aver rimosso il fusto, lo strumento d'inserimento può essere applicato nuovamente alla cage e utilizzato come impattatore percuotendolo direttamente con il martello. Ciò consente di posizionare la cage più anteriormente. L'impattamento deve essere effettuato sotto controllo fluoroscopico.

Strumento d'inserimento come strumento di revisione

Per rimuovere nuovamente l'impianto 4web PSTS è possibile utilizzare il fusto. Il fusto presenta la filettatura per il collegamento della cage, quindi si collega alla cage e viene saldamente serrato. Per la revisione della cage è necessario avvitare lo strumento fino all'arresto. Un impattamento delicato e controllato con il martello a fessura sotto l'attacco dell'impugnatura consente ora di effettuare la revisione della cage.



D30250.a.IT
25.05.2021

 Silony Medical GmbH

Leinfelder Straße 60
70771 Leinfelden-Echterdingen, Germania
Tel. +49 711 78 25 25 0
Fax +49 711 78 25 25 11


www.silony-medical.com

 elabeling.silony-medical.com/contact

MADE IN GERMANY

Montaggio

Inserire il fusto dello strumento d'inserimento 4W-3010 nello strumento d'inserimento 4W-3011/ 4W-3012 (1) e ruotarlo in direzione del lucchetto chiuso (2) fino a che può muoversi di nuovo liberamente avanti e indietro.

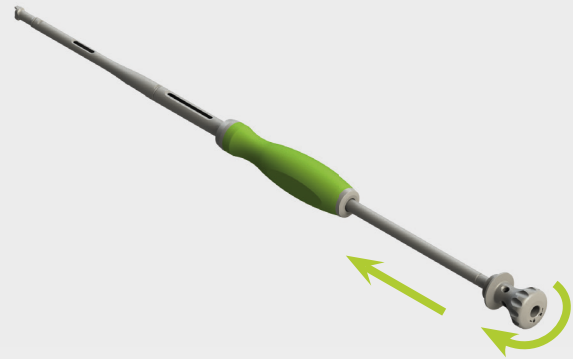

Smontaggio

Tirare indietro il fusto dello strumento d'inserimento 4W-3010 fino al punto di arresto (1). A questo punto ruotare il fusto in direzione del lucchetto aperto (2) fino a liberare il fusto.



ATTENZIONE: ferma restando la limitazione della combinazione con prodotti di terzi specificata nelle istruzioni per l'uso (D30003), una combinazione degli strumenti descritti nel presente documento con i prodotti del sistema PSTS di 4web è esplicitamente ammessa e non ha ripercussioni negative sull'esito dell'intervento. Tutti gli altri requisiti delle istruzioni rimangono validi ed efficaci.

D30250.a.IT
25.05.2021