

Réduction avec l'outil de réduction

SI-0043
SPECIAL Poignée de réduction à
ailettes Quick Torx



VI-1360
VERTICALE Outil de réduction



VI-1361
VERTICALE Insert de réduction



Adapter d'abord l'outil de réduction VERTICALE à la forme de la tête de vis.

Placer le set de réduction VERTICALE dans l'outil de réduction sans forcer. L'outil SPECIAL est posé sur la tête Torx disponible de l'insert et la tige est introduite dans la tête de vis en tournant le manche avec poignée transversale (Fig. 1). La position du corps vertébral est simultanément corrigée en direction postérieure.

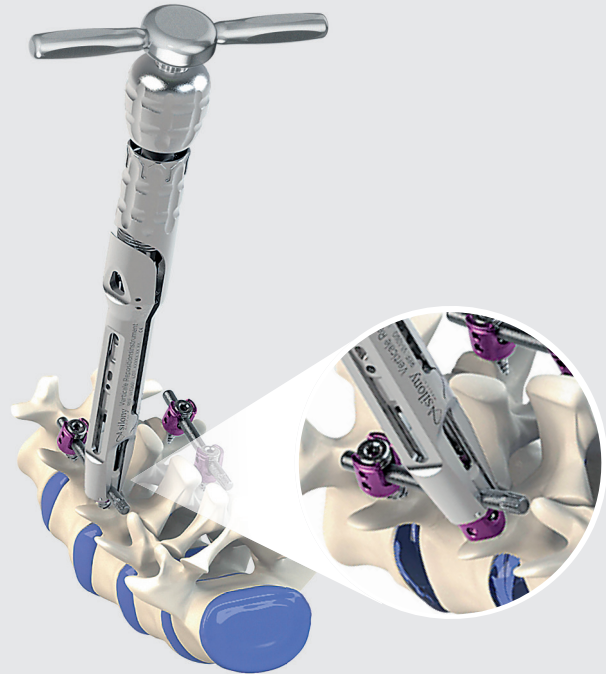


Fig. 1 Manœuvre de réduction avec l'outil de réduction

 D30003

 D30000

D30200.a.FR
25.11.2019

 **Silony Medical Europe GmbH**

Bahnhofstraße 1
28195 Bremen

Tel +49 421 246 956 0

Fax +49 421 246 956 55

 **Silony Medical GmbH**

Leinfelder Straße 60
70771 Leinfelden-Echterdingen

Tel +49 711 78 25 25 0

Fax +49 711 78 25 25 11

www.silony-medical.com

MADE IN GERMANY